

PLAZADENTE
indústria



PASSO A PASSO:

**como ligar sua Caixa
Esterilizadora**




PLAZADENTE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

1. Cuidado com a trava preta ao fechar a tampa

Certifique-se de levantar a trava preta antes de fechar a tampa para garantir o fechamento adequado e seguro.

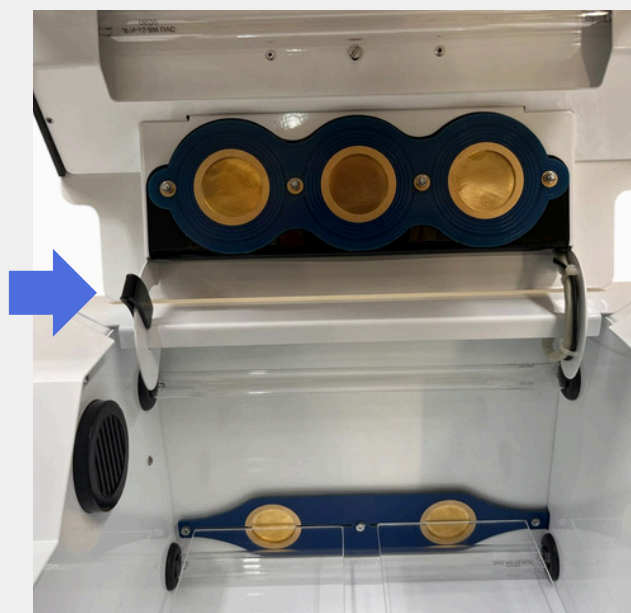

2. Atualizar Data e Hora no Aplicativo

Para iniciar o procedimento, é necessário atualizar a data e hora da caixa esterilizadora. Siga o passo abaixo para fazer isso:

Pelo Wi-Fi:


- Acesse as configurações de Wi-Fi do seu celular.
- Localize a rede Wi-Fi da caixa esterilizadora e conecte-se.



- A senha será composta pelas letras finais do nome da rede Wi-Fi.



- Assim que conectado, uma página abrirá automaticamente no navegador do celular.
- Nessa página, clique na opção "Usuário".
- Você será direcionado para outra tela onde poderá atualizar a data e hora.

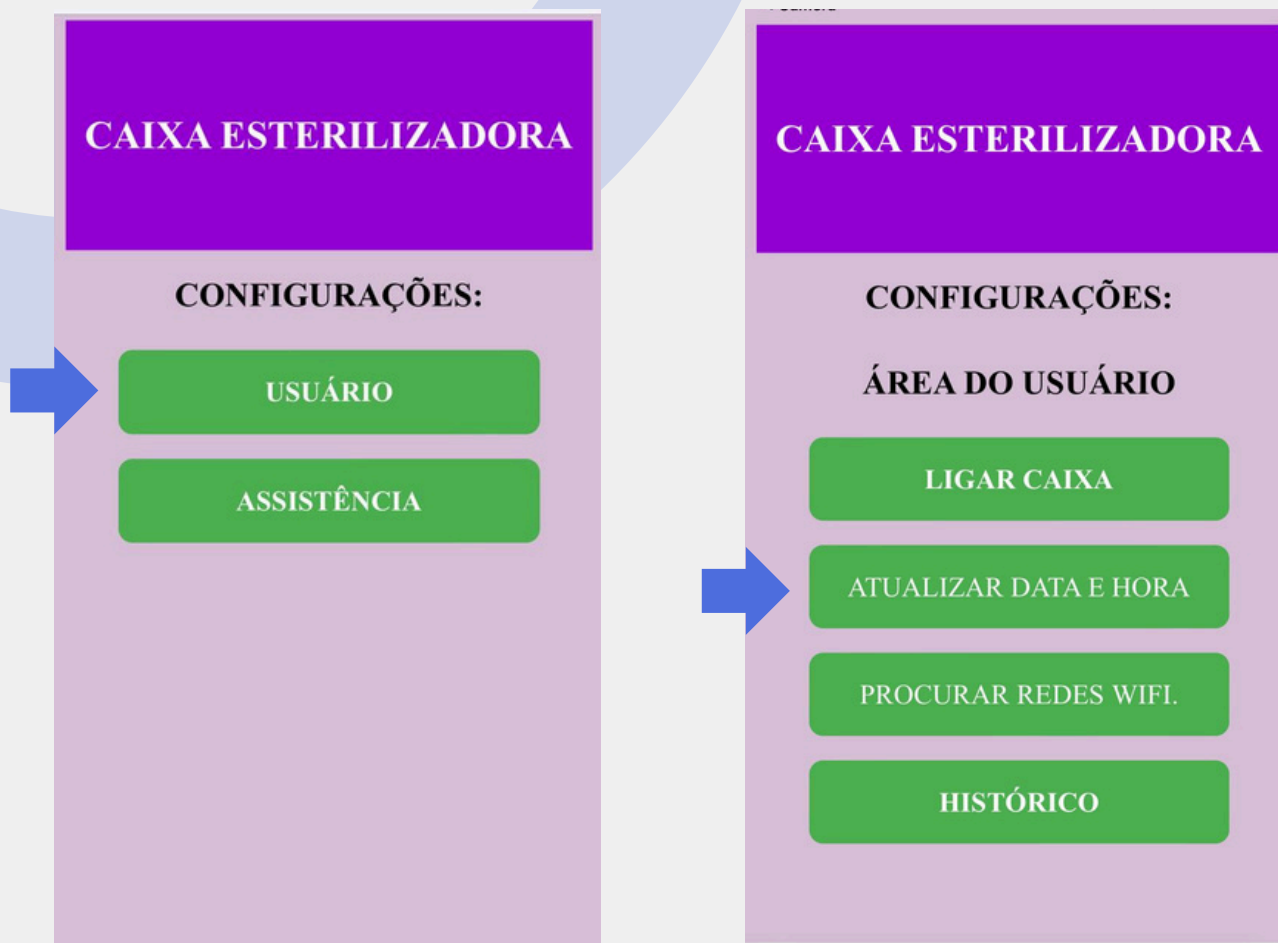

2. Ligar a Caixa Esterilizadora

Após atualizar a data e hora, você pode ligar a caixa esterilizadora de duas formas:

- **Pelo Navegador:** Utilize o navegador do celular, onde você já está conectado à página da caixa.
- **Ou Diretamente na Caixa:** Localize o botão de ligar na própria caixa esterilizadora e pressione-o para iniciar o funcionamento.



3. Inicie o Ciclo de Esterilização

Dito isso, inicie o ciclo de 5 minutos. Após esse período, sua esterilização estará completa! Agora, é só retirar os instrumentos que você irá utilizar e pronto para o uso. Simples assim!





Lembrando que o histórico de esterilização é salvo automaticamente no navegador! Assim, você pode acessar facilmente quando precisar.

CAIXA ESTERILIZADORA

CONFIGURAÇÕES:

ÁREA DO USUÁRIO

LIGAR CAIXA

ATUALIZAR DATA E HORA

PROCURAR REDES WIFI.

HISTÓRICO

CAIXA ESTERILIZADORA

CONFIGURAÇÕES:

VOLTAR

HISTÓRICO:

23 -- 2024/10/17 -- 13:29:02

CONCLUÍDO COM SUCESSO

22 -- 2024/09/24 -- 11:30:02



PLAZADENTE

ORIENTAÇÃO E SUPPORTO TÉCNICO

Caso precise de assistência técnica ou tenha alguma dúvida, tenha em mãos o número do equipamento e entre em contato com o SAC pelo telefone (43) 3325-5000 ou acesse o site www.plazadente.com. Nossa equipe está disponível para orientá-lo e/ou indicar a assistência técnica credenciada mais próxima.